

INDICE

1	SCOPO.....	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI.....	2
4.	RESPONSABILITA'	2
5.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'.....	2
5.1.	Scarico della terapia in unità posologica non completo per riempimento dei 20 cassette del carrello.....	2
5.2.	Tempistica di verifica dell'associazione paziente-cassetto in fase di allestimento e somministrazione della terapia	4

STATO DELLE REVISIONI

Rev	Data	Modifica	Redazione	Verifica contenuti e conformità norma UNI EN ISO 9001:2008	Approvazione
00	13/04/2015	Prima emissione	IBSL A. Ferrari 	Gruppo FAR HPG23* N. Soliveri RO IBSL M. Piccini RO FAR V. Gatti 	IBSL F. Rudello RU FAR G. Taddei

*E. Arnoldi, M. L. Daminelli, N. Soliveri

1 SCOPO

La presente IO descrive, nell'ambito del servizio di supporto alla Farmacia per la gestione informatizzata del farmaco in unità posologica, le modalità con le quali è possibile procedere nel caso in cui vengano riempiti i 20 cassette del carrello senza che sia stato completato lo scarico della terapia selezionata.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

USC attive con il servizio.

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

ARA Armadio Automatizzato di Reparto

4. RESPONSABILITA'

Personale Infermieristico.



5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

5.1. Scarico della terapia in unità posologica non completo per riempimento dei 20 cassette del carrello

- Verificare, al completamento dello scarico della terapia su carrello, che la fascia selezionata sia azzurra. Nel caso in cui la fascia selezionata nella lista di prelievo sia verde scuro come da figura

lo scarico delle terapie della fascia selezionata non è terminato in quanto è stato riempito anche l'ultimo cassetto del carrello di terapia.

- Il Personale Infermieristico, presa consapevolezza del fatto che lo scarico della terapia è avvenuto in maniera parziale, prosegue con lo sblocco del carrello
- Selezionare "Esci"
- Selezionare l'icona "Gestione cassettiere e carrelli"
- Selezionare "Sblocca carrello" nella sezione "COMANDI"

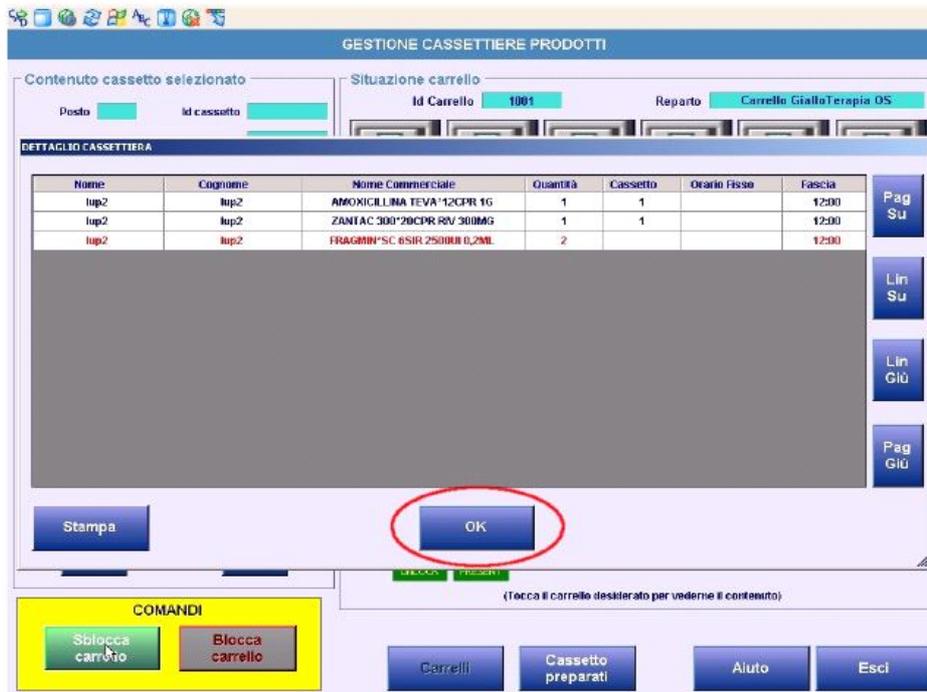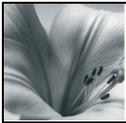

- Verificare la lista di dettagli di scarico e selezionare “ok”
- Selezionare “Esci”
- Staccare fisicamente il carrello dall’ARA
- Il Personale Infermieristico procede con la preparazione, allestimento e somministrazione di terapia. Al successivo attacco del carrello all’ARA, il Personale Infermieristico, nella fase di selezione della fascia oraria di terapia, verrà informato del messaggio analogo all’esempio della figura



in modo tale da poter selezionare, se lo desidera o meno, il completamento dello scarico sospeso di terapia.

- Alla domanda “Procedere con lo scarico ?” l’armadio automatizzato procede con il completamento dello scarico di terapia sospeso solo nel caso in cui il Personale Infermieristico seleziona “SI”.
- Procedere con i successivi passi come da “IO03IBSLHPG23 Scarico terapia in monodose su carrello”



5.2. Tempistica di verifica dell'associazione paziente-cassetto in fase di allestimento e somministrazione della terapia

- Scarichi di terapia in orario notturno tra le 2:00 e le 3:00: l'associazione paziente-cassetto può essere visualizzata, su Farmasafe, 30 minuti dopo il completamento dello scarico di terapia da ARA (attività che termina con lo sblocco del carrello)
- Scarichi di terapia in orario differente al periodo notturno tra le 2:00 e le 3:00: l'associazione paziente-cassetto può essere visualizzata, su Farmasafe, 2 minuti dopo il completamento dello scarico di terapia da ARA (attività che termina con lo sblocco del carrello)

Pertanto NON E' CONSIGLIATO scaricare la terapia dall'armadio automatizzato dalle ore 2:00 alle ore 3:00.