



Allegato

Istruzioni per la vestizione e la svestizione del sistema elettroventilato nel blocco operatorio

Vestizione del sistema elettroventilato Versaflo TR-300+ Blocco Operatorio	
Step	Azioni
1.	Accendere il sistema elettroventilato Versaflo TR-300+ regolando il flusso dell'aria, tramite apposito pulsante
2.	Indossare la cintura e l'apparecchiatura Versaflo TR-300+ , comprensiva del tubo
3.	Indossare il copricapo personale e collegare il tubo all'apparecchiatura Versaflo TR-300+
4.	Indossare il camice chirurgico sterile, sopra la divisa e apparecchiatura Versaflo TR-300+
5.	Indossare il camice chirurgico/tuta, sopra la divisa e apparecchiatura Versaflo TR-300+
6.	Indossare un paio di guanti chirurgici sterili avendo cura di sovrapporre il guanto sul polsino del camice

Illustrazione della vestizione del sistema elettroventilato nel Blocco Operatorio

Le figure sotto riportate hanno la finalità di consolidare quanto descritto nella sequenza.

FIGURA 1: ACCENDERE IL SISTEMA ELETTROVENTILATO VERSAFLO TR-300+ REGOLANDO, TRAMITE APPOSITO PULSANTE, IL FLUSSO DELL'ARIA



FIGURE 2, 3 E 4: INDOSSARE LA CINTURA E L'APPARECCHIATURA VERSAFLO TR-300+, COMPRENSIVA DEL TUBO





FIGURE DA 5 A 8: INDOSSARE IL COPRICAPO PERSONALE E COLLEGARE IL TUBO ALL'APPARECCHIATURA VERSAFLO TR-300+



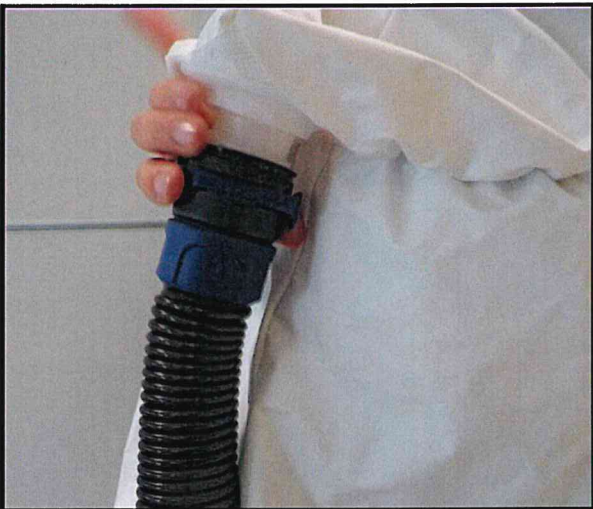




FIGURE 9, 10 E 11: INDOSSARE IL CAMICE CHIRURGICO STERILE, SOPRA LA DIVISA E APPARECCHIATURA VERSAFLO TR-300+



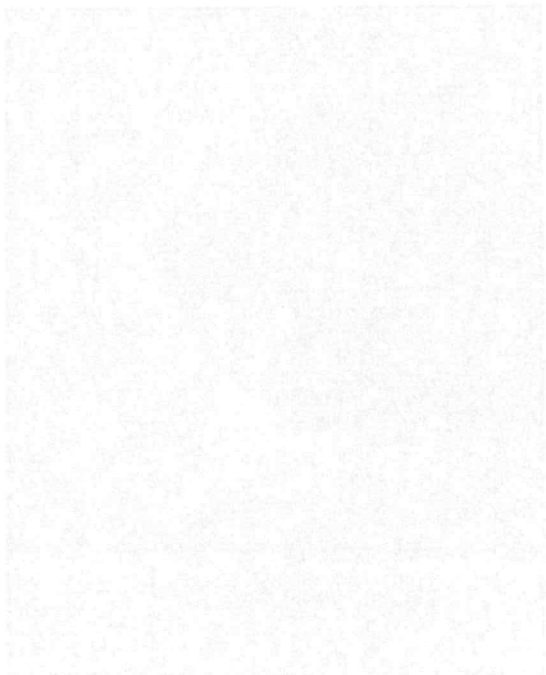




FIGURA 12: INDOSSARE UN PAIO DI GUANTI CHIRURGICI STERILI AVENDO CURA DI SOVRAPPORRE IL GUANTO SUL POLSINO DEL CAMICE

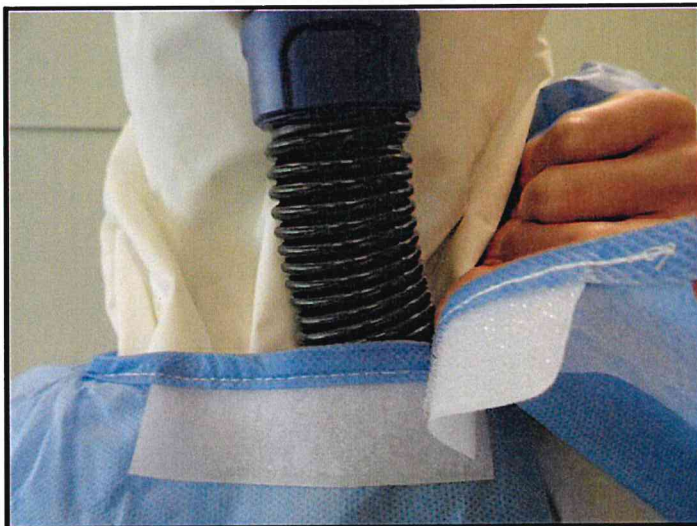

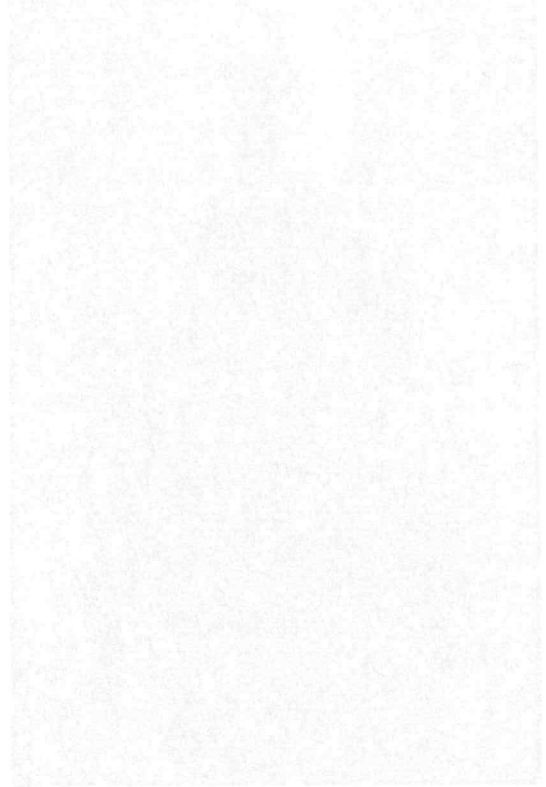

Svestizione del sistema elettroventilato Versaflo TR-300+ Blocco Operatorio

Step	Azioni
1.	Rimuovere il camice chirurgico ed i guanti, riporli nel contenitore per rifiuti speciali Halipack
2.	Igienizzare le mani
3.	Spegnere il sistema elettroventilato Versaflo TR-300+ Rimuovere la cintura e l'apparecchiatura Versaflo TR-300+ riporli nel contenitore previsto per la sanificazione
4.	Rimuovere il copricapo e riporlo nel contenitore previsto
5.	Igienizzare le mani
6.	Indossare la mascherina chirurgica/facciale filtrante

Illustrazione della svestizione del sistema elettroventilato nel Blocco Operatorio

Le figure sotto riportate hanno la finalità di consolidare quanto descritto nella sequenza.

FIGURE 1 e 2: RIMUOVERE IL CAMICE CHIRURGICO ED I GUANTI, RIPORLI NEL CONTENITORE PER RIFIUTI SPECIALI HALIPACK



FIGURE 3 e 4: SPEGNERE IL SISTEMA ELETTROVENTILATO VERSAFLO TR-300+, RIMUOVERE LA CINTURA E L'APPARECCHIATURA VERSAFLO TR-300+ RIPORLI NEL CONTENITORE PREVISTO PER LA SANIFICAZIONE

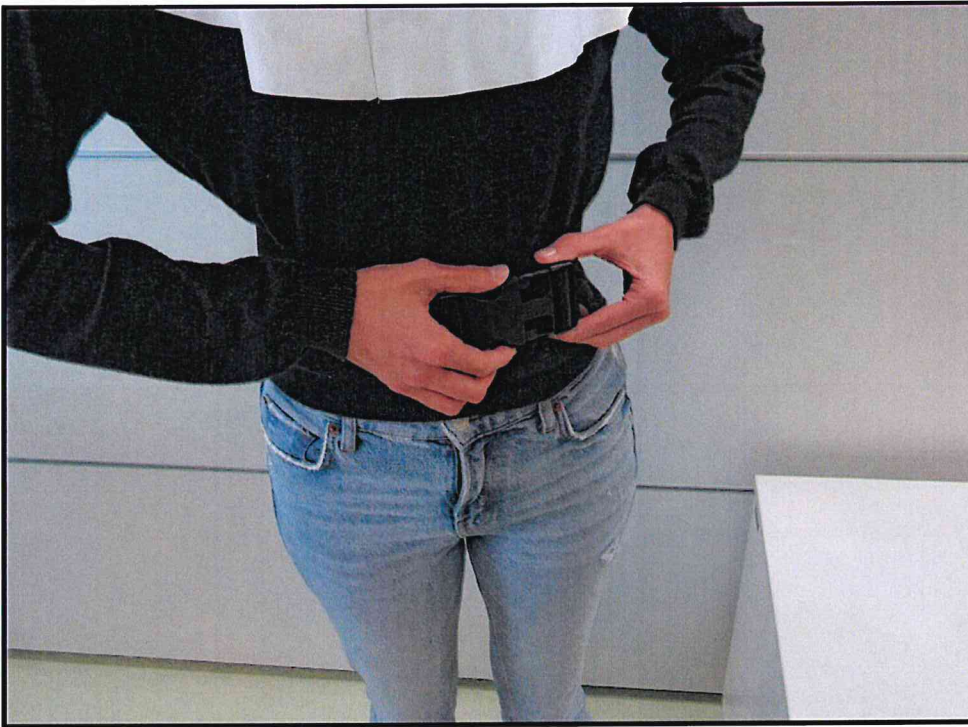


FIGURA 5: RIMUOVERE IL COPRICAPO E RIPORLO NEL CONTENITORE PREVISTO

