

GESTIONE MATERASSI

DECONTAMINAZIONE DEL MATERASSO

MATERASSO CON RIVESTIMENTO CONTAMINATO DA MATERIALE BIOLOGICO DURANTE LA DEGENZA

PRESENZA DI MATERIALE ORGANICO

- Rimuovere il materiale organico e versare sulla superficie contaminata CLORO ad alta concentrazione 10.000 ppm
- Raccogliere i residui con panni monouso
- Smaltire il tutto nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- Applicare nuovamente il CLORO ad alta concentrazione 10.000 ppm.
- Tempo di contatto almeno 15 minuti
- Procedere alla detersione-disinfezione di tutta la superficie con medesimo prodotto

PRESENZA DI MINIME QUANTITA' DI MATERIALE ORGANICO (GOCCE, MACCHIE)

- Decontaminare con panni monouso e **CLORO ad alta concentrazione 10.000 ppm**
- Smaltire il tutto nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- Procedere alla detersione/disinfezione di tutta la superficie con **CLORO a 1.000 ppm**

Durante tutte le fasi di decontaminazione, detersione/disinfezione si devono adottare i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo specifica IO SPP

LAVAGGIO DEL MATERASSO

MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON CONTAMINATO DA MATERIALE BIOLOGICO DURANTE LA DEGENZA

- Detersione-disinfezione di tutta la superficie con CLORO a 1.000 ppm

MATERASSO CON RIVESTIMENTO CONTAMINATO DA MATERIALE BIOLOGICO DURANTE LA DEGENZA

- Vedi decontaminazione del materasso

MODALITA' DI INVIO AL LAVAGGIO

- Posizionare il materasso completo di federa in **un sacco monouso trasparente**
- Il materasso utilizzato nell'assistenza a persone con precauzioni aggiuntive da Contatto, Droplet e Aeree o materasso che presenta rotture o erosione della copertura impermeabile **utilizzare un doppio sacco monouso trasparente**
- Collocare il materasso all'interno dell'area/locale «sporco» per il ritiro da parte del personale addetto al trasporto pesante
- I sacchi sono forniti dalla ditta appaltatrice del servizio "Lavanolo"

TABELLA DILUIZIONE DETERGENTE/DISINFETTANTE

DEORNET CLOR®	200 ml X 0,5 Lt Acqua 10.000 ppm	DECONTAMINAZIONE
DEORNET CLOR®	20 ml X 0,5 Lt Acqua 1.000 ppm	DISINFEZIONE
DURATA DELLA SOLUZIONE 24 ORE		